

汎用冷凍手術ユニット
クライオプロ





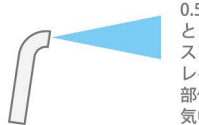
CryoPro

安全性・機能性に優れている
コンパクトな設計
豊富なアクセサリーが選択可能



*仕様外観などの変更が予告なくある場合がございます

標準付属品スプレイアパーチャーの詳細 (イメージ図)

Aスプレイ	Bスプレイ	Cスプレイ	Dスプレイ	ベントスプレイ
				
1 mm 径のスプレイで、深く広範囲の皮膚に適応	0.75mm 径のスプレイで、やや広範囲の皮膚に適応	0.55mm 径のスプレイで、疣等に適応	0.45mm 径のスプレイで、小さな疣等に適応	0.55mm 径、長さ6 cmのところど角度が付いたスプレイで通常のスプレイでは治療が困難な部位に適応 (ガスが空气中に漏れ拡散するのを避けます)

【使用上の注意】

- 液体窒素はそれ自体で圧力をもつ冷凍剤で理論上は -196°C になりますので、取り扱いと保管には十分な注意が必要です。この冷凍剤の取り扱いと保管については搬入される際の注意書きをご参照ください。
- このクライオプロを構成している構成部品は 0°C 以下の温度になりますので、(例えば、スプレーパーチャー、コンタクトプローブ、ボトルの口、デュワーキャップに付いている圧力通気孔)決して皮膚がそれらの部分に触れないように十分注意してください。
- クライオプロを必要以上に傾けると、液体窒素が圧力通気孔から漏れ出します。もし、圧力通気孔から窒素が漏れ出したら、すぐにクライオプロを真っ直ぐに立て直してください。クライオプロの傾斜度は液体窒素の充填量によります。
- 使用后、デュワーキャップを外し、内圧を開放してください。また、液体窒素が残っている場合は補填タンクに戻してください。
- クライオプロ内に窒素が残っていないなくても、まだ圧が上がっている場合があります。デュワーキャップを外す際は、最初に少しデュワーキャップを回して排気をして圧力を下げてから、ボトルの底を持ちデュワーキャップをゆっくりと回してください。
- アクセサリを取り外す際は、十分時間をあけ、アクセサリの温度が常温になるまで、取り外ししないでください。
- 使用していない時は、子供や、許可が無い人間の手が届かない所に保管してください。
- デュワーキャップ、デュワーボトルをよく乾燥させた後、再度デュワーキャップを閉めて保管してください。
- 洗浄方法は、マイルドな石鹼溶液又はアルコールで拭いてください。決して水中に入れて洗ったりしないでください。使用前には本品を乾かした状態にしてください。



■ 本体構成

<ユニット>

- ① クライオプロマックス
- ② クライオプロミニ

<標準付属品>

- ・スプレーパーチャー
Aスプレイ
Bスプレイ
Cスプレイ
Dスプレイ
ベントスプレイ
- ・スプレイ専用スタンド



■ 仕様

一般的名称：汎用冷凍手術ユニット (11067000)
販売名：クライオプロ
薬事分類：高度管理医療機器 (クラスⅢ)
：特定保守管理医療機器

承認番号：22600BZX00522000
本体容量：クライオプロミニ 572 g (350 cc)
：クライオプロマックス 626 g (500 cc)

製造販売元

株式会社エムエムアンドニーク

東京都台東区柳橋 1-16-6

TEL: 03 - 3865 - 6575 FAX: 03 - 3865 - 6585

製造元

Cortex Technology (デンマーク)

販売代理店